

FICHE TECHNIQUE IDOS MEDISPRAY

CODE : IDOME

PRÊT A L'EMPLOI



**DÉSINFECTANT RAPIDE,
ACTIF EN 30 SECONDES,
NOTAMMENT SUR LE CORONAVIRUS.**

BIOCIDE TP1, TP2, TP4

Préparation liquide prête à l'emploi à effet curatif

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : liquide fluide

Couleur : incolore

Odeur : neutre

odeur caractéristique de l'alcool

pH à l'état pur : 8,0 à 9,0

Densité à 20°C : 0,880 à 0,890

Solubilité : totale dans l'eau

CONDITIONNEMENTS

Carton 6 x 750 ml - Pistolet

Carton 12 x 250 ml - Pistolet

Carton 12x1L - Cylindrique

Jerrycan 5L - Gerbable

STOCKAGE

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE UNIQUEMENT PROFESSIONNEL

Numéro d'appel d'urgence :
ORFILA +33 (0)1 45 42 59 59

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

Date de création : 31/10/2017

Date de révision 4 : 17/03/2020

NATURE CHIMIQUE

Substances actives biocides :

• Ethanol (N° CAS 64-17-5) : 63.7 g/100g

• Propan-2-ol (N° CAS 67-63-0) : 6.3 g/100g

USAGES ET PROPRIÉTÉS

IDOS MEDISPRAY est un désinfectant prêt à l'emploi à base d'alcool destiné à la maîtrise des risques microbiologiques en environnement médical (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, crèches, etc.). Il a été développé pour divers usages :

- Pour la désinfection des surfaces lavables telles que :
 - >> les plans de travail et paillasses, l'ameublement (placard des patients, lits, chaises et fauteuils, chariots...),
 - >> les lunettes de toilettes,
 - >> les plateaux repas,
 - >> les poignées de portes,
 - >> les banques réfrigérées, les réfrigérateurs,
 - >> et tout autre matériel médical en contact avec les patients et le personnel médical.

POUR UN EFFET OPTIMAL, IL EST RECOMMANDÉ DE L'UTILISER ENTRE DEUX PATIENTS.

- Pour la désinfection des mains, afin d'éviter toute contamination croisée entre patients et le personnel soignant.

IDOS MEDISPRAY ne contient pas d'aldéhyde ou de phénol. Son odeur neutre convient parfaitement pour les personnes sensibles aux parfums.

IDOS MEDISPRAY garantit un large spectre d'activité biocide, avec une rapidité d'action et laisse des surfaces parfaitement nettoyées sans trace.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Utiliser ce biocide avec précaution // Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.
- L'emballage, vide ou contenant encore du produit, doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet // Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette // Consulter le centre antipoison le plus proche.

ÉTIQUETAGE RÉGLEMENTAIRE – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)

- Pas étiquetage
- Étiquetage: **SGH07; SGH02; H225; H319; H336**
- Étiquetage additionnel

DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

- Non Soumis
- Soumis

CODE DOUANIER

3808.94.90.00

